

Aawyx®

L'expert en désinfection

Aawyx® lingettes Désinfectante inodore Bactéricide Fongicide Virucide



Aawyx® lingette inodore à usage unique est un produit destiné au nettoyage, à la décontamination et à la désinfection par contact de toutes les surfaces fragiles, couveuses, isolateurs, matériels médicaux et dentaires et des mains sur peau saine.

Sans pictogrammes de sécurité

Aawyx® lingette inodore présente, à l'utilisation, une activité sur les bactéries *Staphylococcus aureus* CIP 53154, *Enterococcus hirae* CIP 5855, *Pseudomonas aeruginosa* CIP A22, *Escherichia coli* CIP 54127, et une activité sur *Candida albicans* IP 1180 79 selon une méthodologie mise au point et validée par un laboratoire accrédité COFRAC, dérivée de la norme AFNOR NF T 72-190.

- **BACTERICIDE** conforme normes européennes EN 1040, EN 1276 et normes AFNOR NF T 72-151 spectre 5, NF T 72-171, NF T 72-190. - **FONGICIDE** conforme norme européenne EN 1275

- **ACTIVITE SUR LES VIRUS** : Poliovirus, Adenovirus, Rotavirus, Herpes virus selon la méthodologie de la norme AFNOR T 72-180, actif sur virus VHB Inactivation du virus VIH en 5 minutes (M. A. WAINBERG, 1990)

Aawyx®

LINGETTES A USAGE UNIQUE
(Ne remplace pas une désinfection par trempage)



**Aawyx® Wipes
ODOURLESS**

Single-use wipes,
engineered for cleaning, pre-disinfection and contact disinfection of
equipment, material, sound.

Can be used on hands.

Réf : AA-2063

LINGETTES DESINFECTANTES INODORES

MODE D'EMPLOI

Lingette destinées au nettoyage et à la désinfection par essuyage de tout matériel et surfaces délicates : incubateurs, isolateurs, sondes, claviers d'ordinateurs, téléphones, jouets.

Peut être utilisé dans tous les domaines : dentaire, médical, services de soins, alimentaire, crèches, désinfection rapide des mains.

Formule autorisée pour le contact alimentaire.

Nettoyage, décontamination et désinfection par contact de toutes surfaces. Frotter les surfaces pendant au moins 2 secondes.

Bien refermer le couvercle en dehors des périodes d'utilisation.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES DU LIQUIDE D'IMPREGNATION

- BACTERICIDE conforme normes européennes EN 1040, EN 1276 en condition de saleté.
- FONGICIDE conforme norme européenne EN 1275
- VIRUCIDE actif sur rotavirus, virus herpes poliovirus selon la norme NF T 72-180, actif sur virus VHB, HIV-1

La lingette présente à l'utilisation une activité sur *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* et sur *Candida albicans* selon une méthode dérivée de la norme NF T 72-190.

COMPOSITION

Substance active biocide TP1 TP2-TP4 : Chlorure de Benzalkonium 0.5% m/n (n°CAS 61789-71-7).
Peroxydes stabilisés, ammoniums quaternaires, excipient < 5%.

Boîte de 120 lingettes 130x200 mm.

80755810

Aawyx®
L'expert en désinfection

Aawyx - BP 145 - 42303 Roanne cedex - Tél : 04 77 67 60 39 - Fax : 04 77 67 60 63 - www.aawyx.com

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

Aawyx® lingette inodore est composé d'un non-tissé à usage unique d'excellente qualité imprégné d'une formulation désinfectante.

ACTIVITE DE LA LINGETTE A L'UTILISATION

L'activité de **Aawyx® lingette inodore** est validée expérimentalement, dans les conditions d'emploi, par une étude publiée dérivée de la méthode porte-germes norme AFNOR NF T 72-190 (PATHOLOGIE



BIOLOGIE, 1993, 41, n°4 : 369-374). L'essai consiste à frotter pendant **2 secondes** un porte-germes contaminé expérimentalement avec la lingette imprégnée. La contamination de la lingette et du porte-germes est contrôlée. La réduction observée par rapport à l'inoculum de départ est supérieure à 5 logarithmes décimaux pour les bactéries de référence relatives à la norme NF T 72-190, et supérieure à 4 logarithmes décimaux pour *Candida albicans* IP 1180 79.

TOXICOLOGIE

- DL 50: 85 ml/Kg < DL 50 < 90 ml/Kg
- Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.
- Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'applications itératives.

COMPOSITION DU PRODUIT D'IMPRÉGNATION

- PEROXYDES • AMMONIUMS QUATERNAIRES SYNERGISÉS
- EXCIPIENTS • ETHANOL à 95 °<5%

Les composants entrant dans la composition du produit d'imprégnation de **Aawyx®lingette inodore** font partie de la liste positive des composants autorisés pour le contact alimentaire

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT D'IMPRÉGNATION

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| • Aspect : Liquide | • Conservation : à l'abri | • pH : 10 ± 1 |
| • Odeur : neutre | de la lumière, à une | • Péremption : > 4 ans |
| • Couleur : Opalescent | température supér à 4% | |

INDICATIONS

Aawyx®lingette inodore est utilisé pour la décontamination, le nettoyage et la désinfection rapide de toutes surfaces.

Aawyx®lingette inodore pour un essuyage désinfectant des mains gantées ou non.

Aawyx®lingette inodore est particulièrement recommandé pour enfermer l'aérosol provoqué lors du retrait des gants. Les germes récupérés sur la lingette après utilisation sont pratiquement inexistants, ce qui supprime toute recontamination ultérieure, protège l'utilisateur et ne présente pas de risque pour l'environnement.

PROTOCOLE D'UTILISATION

La surface doit être frottée pendant au moins 2 secondes

Il est recommandé de fermer le couvercle du dispenser en dehors des périodes d'utilisation pour que le taux d'imprégnation reste optimum jusqu'à la dernière lingette.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI (cf. fiche de données de sécurité)

- | | |
|-----------------------|---|
| Réf : AA-2063 | boîte de 120 lingettes imprégnées 130x200 (carton de 12 boîtes) |
| Réf : AA-20630 | recharge de 120 lingettes imprégnées 130x200 (carton de 24 recharges) |
| Réf : AA-2071 | boîte de 120 lingettes grand format 165x400 (carton de 6 boîtes) |
| Réf : AA-20710 | recharge de 120 lingettes grand format 165x400 (carton de 10 recharges) |
| Réf : AA-2064 | étui de 100 pochettes individuelles (carton de 30x100) |
| Réf : AA-2072 | seau de 1200 lingettes grand format 200x230 |